


Rectal Self-Swab Collection Instructions


Instrucciones para obtener muestras rectales con un hisopo

- 1** Take swab package from the Specimen Cabinet. Open swab package and remove one clean swab.
Tome un paquete de hisopos del gabinete (Specimen Cabinet). Abra el paquete de hisopos y tome un hisopo limpio.

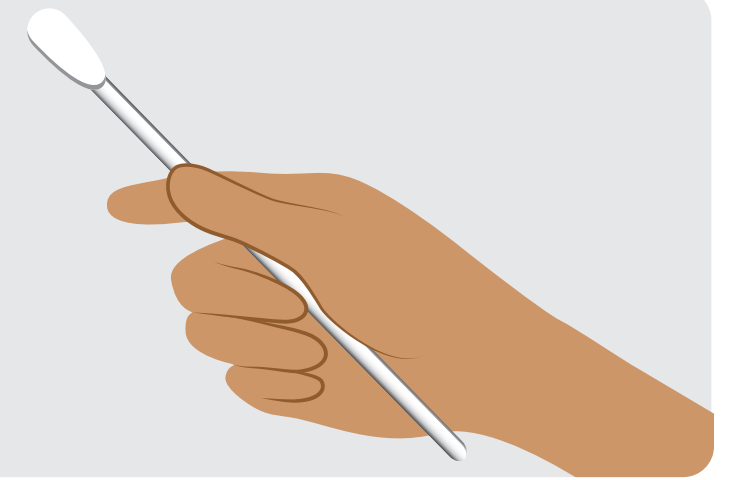


- 2** Insert the clean swab about 1 inch into the anus and rotate swab against the rectal wall at least 3 times. If there is visible feces (stool) on the swab, place the swab into red biohazard container and repeat this step with the clean swab.

Introduzca el hisopo aproximadamente 1 pulgada dentro del ano y gire el hisopo contra la pared rectal al menos 3 veces. Si ve excremento en el hisopo, deposite el hisopo en el recipiente rojo para desechos biológicos (biohazard), y repita este paso con un hisopo limpio.

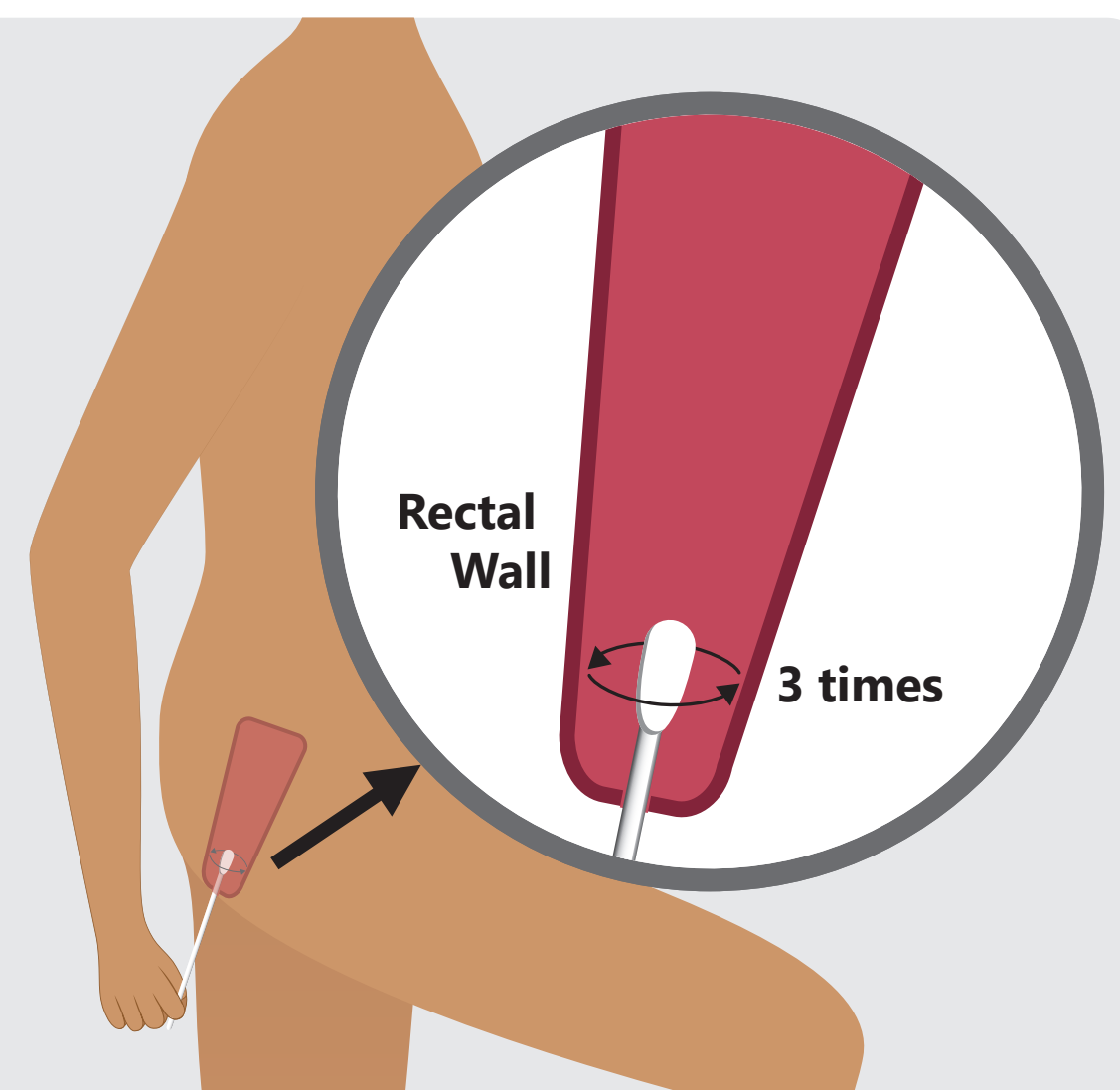

- 3** Without spilling the liquid inside, carefully remove the cap from the tube with the "Rectal" label. Place the swab in the tube (swab side down).

Sin derramar el líquido que contiene, con cuidado quite la tapadera del tubo con etiqueta que dice "Rectal". Coloque el hisopo en el tubo, con la muestra hacia abajo.

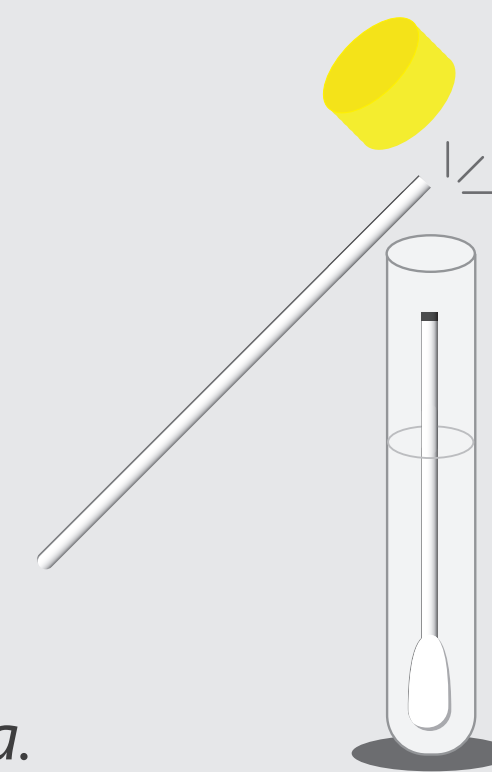

- 4** Carefully break the swab shaft at the black line.
Con cuidado rompa el mango del hisopo a la altura de la línea negra.

- 5** Put cap back tightly on tube to prevent any leaking.
Ponga la tapadera al tubo, apretándola para evitar escurrimiento.

- 6** Wash your hands. Place tube back into the Specimen Cabinet.
Lávese las manos. Regrese el tubo al gabinete de muestras.

